

## TAGLIAPILLOLE

902260470



*Dimensioni lama INOX*  
35 x 10 mm

## SPECIFICHE

Per tagliare in modo pratico i vari medicinali in compresse.

L'alternativa ai metodi classici.

La **speciale lama inox** dalle nuove dimensioni di 35 mm con altezza 10 mm con aggancio sagomato permette di inserire compresse dal diametro di circa 5,1 mm fino ad una lunghezza di circa 22 mm per un'altezza massima di circa 7,7 mm.

### IMPORTANTE

Si consiglia di conservare la parte di compressa rimanente se possibile nella confezione originale oppure in un pratico portapillole. Utilizzare sempre con attenzione sia in fase di inserimento, che di prelievo delle compresse divise.

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Lavare l'articolo prima dell'utilizzo, e dopo ogni successivo riutilizzo. La fotografia raffigurata sulla confezione ha solamente scopo illustrativo su come possa essere utilizzato il prodotto, ma non deve essere interpretata come linea guida di utilizzo per tutti i medicinali.

Si richiede quindi di leggere attentamente il foglio illustrativo del prodotto o di contattare il proprio medico o farmacista in merito alla sua conservazione.

### PER UN USO CORRETTO

1. posizionare il tagliapillole su una superficie piana.
2. Inserire la compressa tra le guide.
3. Portare con fermezza la lama completamente in basso.
4. Una volta tagliata la compressa inclinare il tagliapillole chiuso verso il basso fino a far scivolare le parti tagliate e divise nelle 2 diverse vaschette di raccolta poste alla base della lama. In alternativa a seconda delle dimensioni o della composizione della compressa aprire il tagliapillole per accedere al medicinale.

da: **S.A.CONULTING & TRADING sas**  
**Villanuova sul Clisi (BS)**  
**Tel. 0365 374074**  
**info@pillolbox.it**