

## TAGLIAPILLOLE

902260470



*Dimensioni lama INOX*  
35 x 10 mm

## SPECIFICHE

Per tagliare in modo pratico i vari medicinali in compresse.

L'alternativa ai metodi classici.

La **speciale lama inox** dalle nuove dimensioni di 35 mm con altezza 10 mm con aggancio sagomato permette di inserire compresse dal diametro di circa 5,1 mm fino ad una lunghezza di circa 22 mm per un'altezza massima di circa 7,7 mm.

### **IMPORTANTE**

Si consiglia di conservare la parte di compressa rimanente se possibile nella confezione originale oppure in un pratico portapillole.

Utilizzare sempre con attenzione sia in fase di inserimento, che di prelievo delle compresse divise.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Pulire sempre prima dell'uso, o se usato per il taglio di compresse da più persone.

### **PER UN USO CORRETTO**

1. posizionare il tagliapillole su una superficie piana.
2. Inserire la compressa tra le guide.
3. Portare con fermezza la lama completamente in basso.
4. Una volta tagliata la compressa inclinare il tagliapillole chiuso verso il basso fino a far scivolare le parti tagliate e divise nelle 2 diverse vaschette di raccolta poste alla base della lama. In alternativa a seconda delle dimensioni o della composizione della compressa aprire il tagliapillole per accedere al medicinale.