

FRANTUMAPILLOLE

A902260482



Nuovo funzionamento a pressione manuale abbinato alle bustine monodose per evitare la dispersione del farmaco e garantire una maggiore igiene.

SPECIFICHE TECNICHE

Si consiglia l'uso delle **bustine monodose** che troverete all'interno della confezione (7 pezzi nella nuova misura 30x110mm) per evitare la dispersione del farmaco e **una maggiore igiene** soprattutto in caso di farmaci di diverso tipo o se utilizzato da più persone.

Una volta terminate le bustine in dotazione **richiedere la confezione da 7 pezzi delle singole bustine.**

In caso di utilizzo del frantumapillole senza bustina (non consigliato) togliere/pulire i residui del farmaco che potrebbero rimanere dopo lo sbriciolamento nella vaschetta o nella parte superiore del frantumapillole prima di essere utilizzato.

PULIZIA

Si consiglia al primo utilizzo o durante l'uso di pulire a secco con uno spazzolino o un pennello, oppure con un panno e detergente delicato per evitare ristagno di liquidi all'interno della scocca.

Se utilizzate più volte la singola bustina (solo dalla stessa persona e con lo stesso farmaco) accertarsi che la bustina sia integra o non rovinata.

Non utilizzare il frantumapillole con residui di farmaco all'interno soprattutto se usato da più persone.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI

1. Tagliare un'estremità della bustina trasparente, che trovate all'interno della confezione.
2. Inserire la pastiglia nella bustina trasparente facendola scivolare sul fondo.
3. Appoggiare il frantumapillole su un ripiano, posizionare la bustina con la pastiglia nella parte più profonda della vaschetta, premere verso il basso la parte superiore del frantumapillole più volte muovendo avanti e indietro, e ruotando la posizione della bustina fino ad ottenere il risultato desiderato.
4. Avrete così il farmaco frantumato nella bustina pronto per poter essere assunto.