

FRANTUMAPILLOLE

A902260482

Dimensioni: 152x 47 x 30 mm



Nuovo funzionamento a pressione manuale abbinato alle bustine monodose per evitare la dispersione del farmaco e garantire una maggiore igiene.

SPECIFICHE TECNICHE

CONSIGLI PER UN USO CORRETTO

Si consiglia l'uso delle bustine monodose che troverete all'interno della confezione.

7 pezzi nella nuova misura 30 x 110mm, per evitare la dispersione del farmaco e una maggiore igiene, soprattutto in caso di farmaci di diverso tipo, o se utilizzato da più persone. Una volta terminate le bustine in dotazione richiedere la confezione da 7 pezzi delle singole bustine con il seguente codice 986130399.

In caso di utilizzo del frantumapillole senza bustina (non consigliato), prima di ogni utilizzo o riutilizzo rimuovere accuratamente e completamente i residui di farmaco che potrebbero rimanere o essere rimasti dopo lo sbriciolamento nella vaschetta o nella parte superiore del frantuma pillole.

PULIZIA:


prima di qualsiasi utilizzo e durante l'uso, pulire il frantumapillole a secco con uno spazzolino o un pennello, o con un panno e detergente delicato per evitare il ristagno di residui o di liquidi all'interno della scocca.

Non utilizzare il frantuma pillole con residui di farmaco all'interno.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI

1. Tagliare un'estremità della bustina trasparente, che trovate all'interno della confezione.
2. Inserire la pastiglia nella bustina trasparente facendola scivolare sul fondo.
3. Appoggiare il frantumapillole su un ripiano, posizionare la bustina con la pastiglia nella parte più profonda della vaschetta, premere verso il basso la parte superiore del frantumapillole più volte muovendo avanti e indietro, e ruotando la posizione della bustina fino ad ottenere il risultato desiderato.
4. Avrete così il farmaco frantumato nella bustina pronto per poter essere assunto.

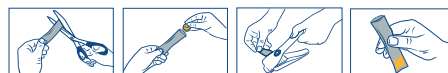

986130399

IMPORTANTE:

CHIEDERE AL VOSTRO MEDICO O FARMACISTA SE IL FARMACO PUÒ ESSERE SMINUZZATO O TRITATO PER NON PREGIUDICARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA.

da: **S.A.CONULTING & TRADING sas**
 Villanuova sul Clisi (BS)
 Tel. 0365 374074
 info@pillolbox.it